

血液検査キット再送のご案内

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度は弊社のデメカル検査サービスをご利用戴きまして
誠にありがとうございます。

さて今回ご返送戴きました血液検体は下記の理由により検査が出来
ませんでした。

再検査キットを送付させていただきますので、もう一度血液検体をお
送り戴きたくお願い申し上げます。



上記QRコードより取説動画を
参照できます。

※ 再検査用キットはなるべく到着より2ヶ月以内にご返送頂けますようお願い致します。

※ 検査キットには使用期限があります。
検査キットに記載の使用期限をご参照ください。
使用期限を過ぎたキットについては検査をすることができなくなりますので、ご注意ください。

■ エラー内容：ろ過した液体が足りず、検査が出来ませんでした

<エラーの原因>

ろ過した液体が検査に必要な量を満たしていなかった

(採取した血液が少量だった、ボトル内の溶液をこぼしてしまったなどの原因が考えられます)

■ 注意点：

失敗しない為の対策・・・(血液が出ない時は作業を中止してください。)

① 手のひらをマッサージ

ランセット(ハリ)を使う前に指先を消毒し、血を出やすくする為に
手首から指先に向けてよくマッサージしてください。
(反対の手の親指と他の指ではさんでください)



② ランセット(ハリ)を使う時

採血する指のツメをテーブルにピタリとつけてください。

③ 血液を絞り出す

心臓より低い(膝などの)位置で、出血した指の腹を
指先に向かって押し、血液を絞り出します。

注意！！

ランセット(ハリ)を2個使って血液がでない場合は
作業を中止してください。その際、ボトルは使わず
白いキャップで密閉してください。



デメカルサポートセンターへご連絡ください。

ランセット他をお送りいたします。

④ 吸引器のチップに血液を吸わせる

吸引器の白い部分を血液だけに当てます。

(通常は4回～5回繰り返します。)

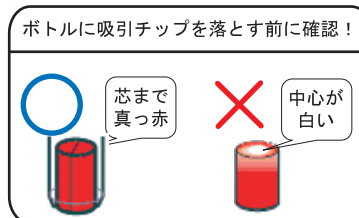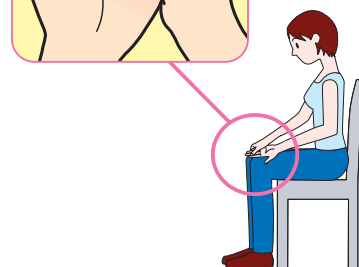

デメカルサポートセンター

0120-100-302

受付時間：9：30～17：30（平日のみ）

URL：<https://www.leisure.co.jp/>

取説動画はホームページからもご覧いただけます。